

ПРИМЕРОК ДОНЕСЕТЕ ГО НА НЕКОЈА ОД
СЛЕДНИТЕ ЛОКАЦИИ:

Како изгледа Evalyn®Brush?

Evalyn®Brush е четка за самостојно земање примерок, долга околу 18 см и се состои од прозирен цилиндар со крилца и капаче. Во внатрешноста на прозирниот цилиндар има розов клип што завршува со бела четка за земање примерок. Крајот на кој се наоѓа четката може да се отвори и да се затвори со розово капаче.



ЛОКАЦИЈА 1



НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ

Бул. „8-ми Септември“ бр. 2, лок. 1, 1000 Скопје
email: lab@avicenalab.com.mk

ЛОКАЦИЈА 2



НАСЕЛБА АЕРОДРОМ

Бул. „Јане Сандански“ бр. 13-1/A 1000 Скопје
email: lab2@avicenalab.com.mk

ЛОКАЦИЈА 3



НАСЕЛБА КИСЕЛА ВОДА

Ул. „Мариовска“ бр.2-А, 1000 Скопје
email: lab4@avicenalab.com.mk

ЛОКАЦИЈА 4



ТЕТОВО

Ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, 1200 Тетово
email: labtetovo@avicenalab.com.mk

Контакт Центар: 02 3179 001



www.avicenalab.com.mk



Rovers® и Evalyn®Brush се регистрирани заштитни знаци на Rovers Medical Devices B.V. со седиште во Ос, Холандија.



Упатство за употреба

Четка за самостојно земање
примерок за HPV тест



evalyn®brush



Инструкции за самостојно земање примерок


Evalyn®Brush е стерилен медицински инструмент што ви овозможува да земете примерок во домашни услови. Користејќи ја Evalyn®Brush, може едноставно и без болно да земете вагинален клеточен материјал што понатаму се анализира во дијагностичка лабораторија.

НАПОМЕНА:

- Не користете ја Evalyn®Brush ако пакувањето е оштетено или ако е изминат рокот на употреба.
- Не користете ја Evalyn®Brush за време на менструален циклус.
- Не користете ја Evalyn®Brush за време на бременост или во првите три месеци по завршувањето на бременоста.
- Не користете вагинални производи барем два дена пред употребата на Evalyn®Brush.
- Вагинални контрацепциски средства, кондоми и лубриканти врз база на вода може да се користат вообично.
- Evalyn®Brush е само за еднократна употреба.
- Повторната употреба може да резултира со инфекција и/или неправилна дијагноза.



1
Темелно измијте си ги рацете пред употреба.

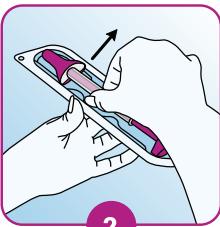


2
Отстранете ја Evalyn®Brush од пакувањето. Не фрлете го пакувањето, бидејќи е неопходно за праќање на примерокот во лабораторија.




3
Притиснете ги страните на розовото капаче со палецот и показалецот за да го извадите капачето. Внимавајте да не го допирате со раце горниот бел дел на четвичката (над крилцата)!




4
Заземете удобен став и стоечка позија слично како при ставање вагинален тампон.

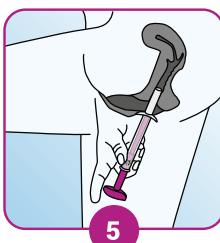

5
Раширете ги срамните усни со едната рака, а со другата вметнете ја четката во вагината сè додека крилцата не ги допрат усните.

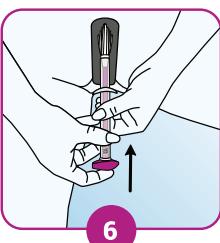

6
С едната рака држете го прозирниот цилиндар, а со другата рака турнете го розовиот клип во правец навнатре. Ќе слушнете „клика“ кога четката е во вистинската позиција.

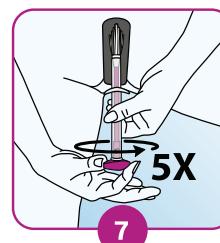

7
Розовиот клип завртете го петпати во иста насока. По секое завртување ќе слушнете „клика“. Ова ќе ви помогне да ги изброите завртувањата. Откако ќе ги направите сите 5 завртувања, внимателно отстранете ја Evalyn®Brush од вагината.




8
Држете го прозирниот цилиндар со едната рака, а со другата рака повлечете го розовиот клип сè додека белата четка целосно не навлезе во прозирниот цилиндар. Додека го правите ова, не допирајте го врвот на четката над крилцата.



9
Држете го прозирниот цилиндар со цел четката да не излезе повторно. Ставете го розовото капаче со палецот и показалецот. Ќе слушнете „клика“ кога капачето е во правилна позиција.



10
Вака затворената Evalyn®Brush вратете ја во пакувањето.

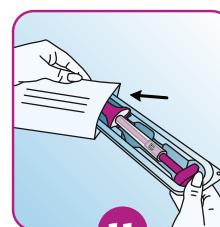

11
Пакувањето заедно со Evalyn®Brush ставете го во ќесето што го добивте во комплетот.



12
Внесете ги вашите лични податоци во изјавата/формуларот и однесете го примерокот во лабораторијата.

*Чувайте го примерокот на собна температура.
*Времето од земање на примерокот до прием во лабораторија да не е подолг од 24 часа.